

3M

Gebrauchsanweisung

1. Die Haut soll trocken und fettfrei sein. Die Schutzfolie vom Augenverband entfernen.
2. Das Auge leicht schließen und Gesichtsmuskeln entspannen. Es sollen sich keine Falten um das Auge bilden.
3. Opticlude™ ohne Dehnung mit der schmalen Seite zur Nase aufkleben.
4. Opticlude ist mit besonders hautfreundlichem Klebstoff versehen, der seine volle Klebkraft durch die Körperwärme entfaltet. Deshalb Opticlude gut anmodellieren (evtl. kurz Hand auflegen).
5. Beim Entfernen den Verband vorsichtig vom Rand zum Zentrum des Auges abziehen.

